



Sterilizācija autoklāvā

skaistumkopšanā

Informāciju sagatavoja • Veselības inspekcija sadarbībā ar Infekciju kontroles un sterilizācijas asociāciju

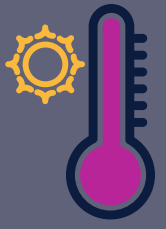

Pakļauj piederumus piesātināta ūdens tvaikam ~ 134 C temperatūrā un paaugstinātā spiedienā

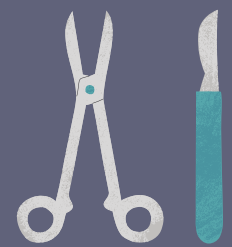

Izmanto piederumiem, kas izturīgi pret mitrumu un augstu temperatūru



Obligāti sterilizē daudzreizējās lietošanas augsta inficēšanās riska piederumus

Iekārtai jābūt CE marķējumam ar 4 ciparu kodu

Sterilizācijai paredzētos piederumus iepako metodei piemērotos maisiņos, tos marķē un aprēķina glabāšanas derīguma termiņu

Veic uzskaites ierakstus par sterilizāciju

Sīkāk informāciju par sterilizācijas procesu skatīt vadlīnijās šeit: <https://ieej.lv/vadlinijas>

Indikatori:

A. Kīmiskie

informē par sterilizācijas darbības efektivitāti.

Izmanto -

I.tipa (parasti iestrādāts maisiņa malās) un V.tipa vai VI.tipa indikatorus

B. Bioloģiskie

pierāda, ka konkrētā sterilizācijas programma spēj iznīcināt mikroorganismu sporas (veic 2x gadā)

Iepakojumi:

medicīniskā

papīra

vai

medicīniskā

papīra -

plastikāta maisiņi

Piederumu iepakojumu pirms sterilizācijas veic, lai nodrošinātu to sterilitāti