



Sterilizācija karstā gaisa sterilizatorā skaistumkopšanā

Informāciju sagatavoja • Veselības inspekcija sadarbībā ar Infekciju kontroles un sterilizācijas asociāciju

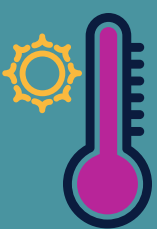

Pakļauj piederumus, cirkulējot karstam gaisam augstā ~ 180 C temperatūrā

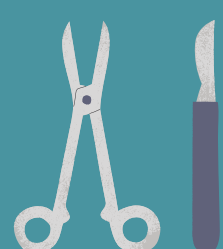

Izmanto piederumiem, kas izturīgi pret augstu temperatūru

Neizmanto augsta inficēšanās riska piederumiem

Iekārtu var lietot arī augsta līmeņa dezinfekcijas sasniegšanai (piederumus ievietojo neiekotus)



Iekārtai jābūt CE marķējumam ar 4 ciparu kodu

Veic uzskaites ierakstus par sterilizāciju

Sterilizācijai paredzētos piederumus iepakoj metodei piemērotā iepakojumā, to marķē un aprēķina glabāšanas derīguma termiņu

Indikatori:

A. Ķīmiskie

informē par sterilizācijas darbības efektivitāti.

Izmanto -

I.tipa un III.tipa vai IV.tipa indikatorus

B. Bioloģiskie

pierāda, ka konkrētā

sterilizācijas programma spēj iznīcināt mikroorganismu sporas (veic 2x gadā)

Piederumu iepakojšanu pirms sterilizācijas veic, ja vēlas nodrošināt to sterilitāti

Iepakojumi:

plastikāta/ neilona maisiņi (bez papīra) vai metāla kaste

Sīkāk informāciju par sterilizācijas procesu skatīt vadlīnijās šeit:

<https://ieej.lv/vadlinijas>